

GENERADOR DE H₂ i150 (PLATA)


GENERADOR DE HIDRÓGENO MOLECULAR



Manual de usuario

MODELO: P00206



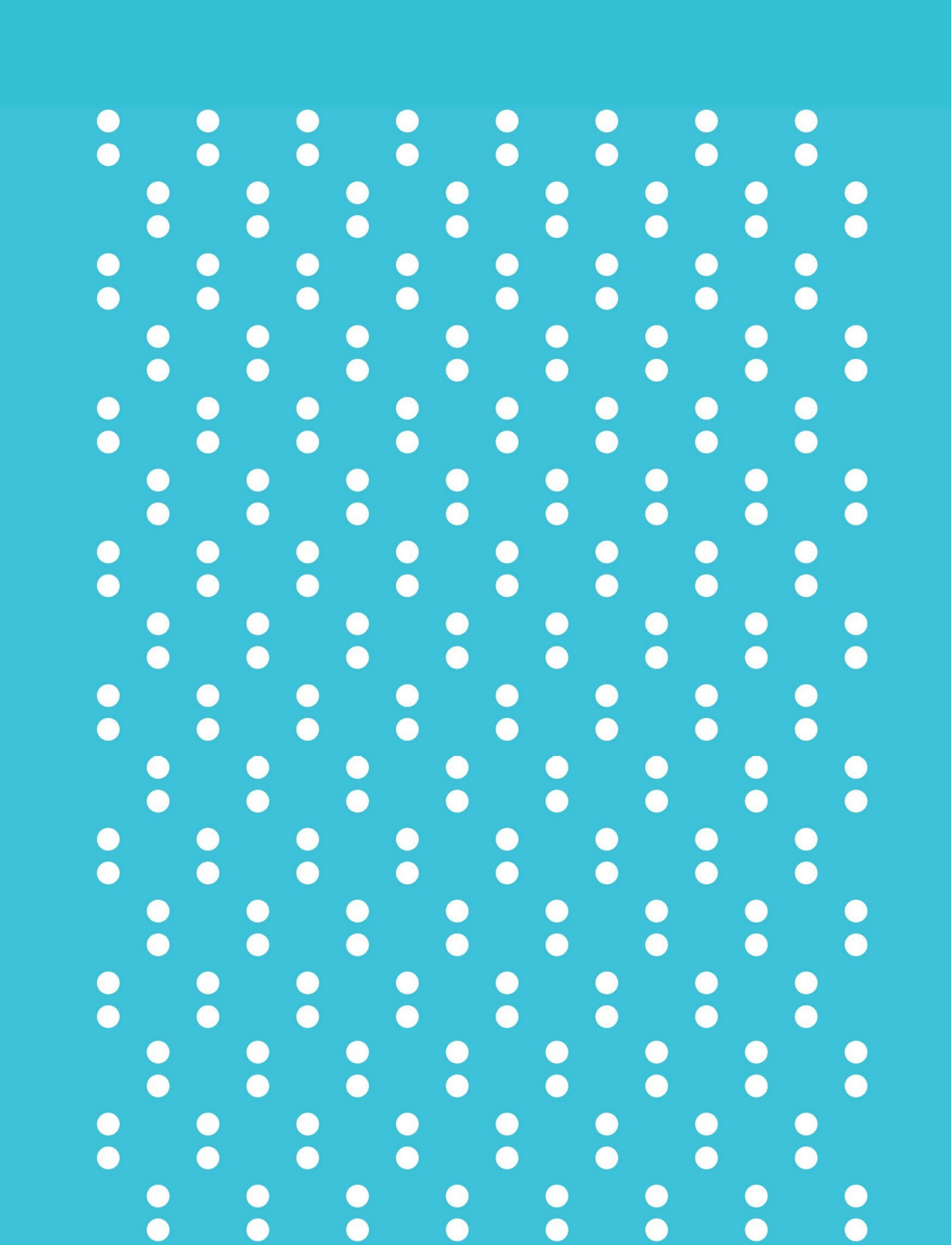

CONTENIDO

1. Características y ventajas	4
2. Antes del primer uso	5
3. Avisos importantes	5
3.1. Líquido de funcionamiento adecuado para el generador	5
3.2. En caso de no utilizar el generador durante un periodo prolongado	5
3.3. Precauciones de seguridad	6
3.4. Manejo de los aplicadores	7
3.5. Tiempo de funcionamiento y mantenimiento	7
4. Especificaciones del generador	7
5. Contenido del paquete	8
6. Descripción general del generador	8
6.1. Sección delantera	8
6.2. Sección superior	8
6.3. Sección trasera y lateral	9
6.4. Sección inferior	9
7. Drenaje y rellenado de agua purificada	10
7.1. Relleno de agua purificada	10
7.2. Drenaje del agua purificada	10
8. Procedimientos de aplicación	11
8.1. Producción de agua hidrogenada	11
8.2. Preparación para la inhalación	12
8.3. Preparación de la aplicación en el oído	13
8.4. Preparación para aplicación ocular	14
9. Solución de problemas	15
10. Información sobre eliminación	16
11. Garantía y condiciones de garantía	16
12. Pérdida de la garantía	16
13. Declaración de conformidad	17
14. Compatibilidad del aplicador	18
15. Tabla de uso del generador y el aplicador	20

Generador de H2 i150

Gracias por adquirir el generador de H2 i150. Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar este producto.

El generador utiliza un método de electrólisis basado en la tecnología patentada de membrana SPE/PEM, que separa el hidrógeno molecular y el oxígeno. Durante el proceso, el hidrógeno molecular fluye hacia la salida designada, mientras que el oxígeno vuelve al depósito con agua purificada.

1. Características y ventajas del generador

- Producción estable de hidrógeno molecular con un caudal de 150 ml/min.
- Sensores para verificar la calidad y la cantidad del agua purificada.
- Fácil manejo.
- Funcionamiento silencioso.
- Bajos costes de funcionamiento y mantenimiento.
- Fácilmente transportable con un práctico estuche incluido.
- Adecuado para uso doméstico.

Fabricante:

H2 Medical Technologies s.r.o.
Muglinovská 154/73, 712 00 Ostrava, República Checa

Distribuidor:

H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.
Muglinovská 154/73, 712 00 Ostrava, República Checa



orders@H2Vibe.com



+420 777 724 731

2. Antes del primer uso de

- Coloque el generador sobre una superficie estable y plana.
Compruebe que la toma de corriente esté correctamente instalada y funcione correctamente.
- Enchufe el generador a la toma de corriente y enciéndalo con el botón ON/OFF. Desatornille la tapa del depósito de agua (según las instrucciones del generador).
- Añada aproximadamente 500 ml de agua purificada al generador, asegurándose de que el nivel del agua quede unos 2 mm por debajo del borde superior de la ventana transparente.
- Vuelva a atornillar la tapa del depósito de agua.
- **No utilice el generador para producir hidrógeno molecular durante 24 horas, permitiendo que la membrana del electrolizador absorba una cantidad suficiente de agua.**
- **Respete el tiempo máximo de funcionamiento permitido del generador (2 horas), seguido de una pausa operativa de 30 minutos.**

3. Avisos importantes sobre el

3.1. Líquido de funcionamiento adecuado para el generador

- **El generador solo puede utilizarse con agua purificada, H2 READY® WATER de la tienda online H2Vibe.com**, diseñada para uso en laboratorio. Esto garantiza el funcionamiento adecuado y duradero del dispositivo. **La garantía del fabricante solo se aplica a los dispositivos llenados con agua purificada comprada en la tienda online H2Vibe.cz.**
- **Nunca llene el depósito del generador con agua del grifo u otra agua mineral**, ya que esto podría causar daños irreversibles no cubiertos por la garantía del fabricante.
- Si necesita transportar el generador a otro lugar, **primero vacíe el agua utilizando la salida de drenaje**. Antes del siguiente uso, vuelva a llenar el generador con agua purificada hasta el nivel requerido.

3.2. En caso de no utilizar el generador durante un periodo prolongado

- Si no va a utilizar el generador durante más de una semana, **deje 200 ml de agua purificada en el depósito** para evitar que se seque la membrana del electrolizador. Siga el mismo procedimiento si tiene previsto almacenar el generador.
- Se recomienda sustituir el agua purificada del depósito con regularidad, **una vez cada dos semanas**, para mantener la calidad necesaria para producir hidrógeno molecular altamente concentrado.
- **No encienda el generador si ha estado inactivo durante un período prolongado**. Drene el agua utilizando la salida de drenaje y rellénelo con agua purificada fresca. El caso contrario puede provocar daños en la membrana del electrolizador.

3.3. Precauciones de seguridad

- **No cubra las aberturas de ventilación. No cierre la salida de hidrógeno molecular con una tapa o tapón, ya que esto podría causar daños debido a la presión.**
- Las instalaciones eléctricas deben cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características del generador.
placa de características del generador.
- Nunca utilice el generador cerca de una llama abierta y tenga en cuenta el riesgo de electricidad estática . No fume mientras maneja el generador.
- Utilice siempre el generador en una habitación bien ventilada y asegúrese de que haya una ventilación regular (al menos entre 10 y 60 minutos). **No lo utilice** en espacios pequeños, cerrados o mal ventilados.
- Nunca deje el generador en funcionamiento sin la supervisión de un adulto.
- No agite, incline ni gire el generador.
- Desenchufe siempre el generador de la toma de corriente cuando no lo utilice. La toma de corriente debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características del generador.
- **No utilice el generador** si el cable de alimentación está dañado, ya que podría provocar descargas eléctricas.
- No doble, retuerza, estire ni dañe de ninguna otra forma las capas aislantes internas y externas capas aislantes internas y externas del cable de alimentación.
- El generador solo es seguro para personas mayores de 18 años. Los usuarios más jóvenes solo pueden utilizarlo bajo la supervisión constante de un padre o un adulto responsable.
- Todos los operadores deben recibir primero las instrucciones adecuadas sobre el uso seguro del generador.
- Asegúrese de que el generador y sus accesorios se mantengan fuera del alcance de los niños, las mascotas y las personas no informadas.
- Antes de cada uso, compruebe cuidadosamente:
 - La ubicación del generador
 - la integridad del aislamiento del cable de alimentación,
 - la funcionalidad del interruptor,
 - el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación,
 - el nivel de agua purificada en el depósito
 - y la limpieza e integridad de todos los adaptadores y accesorios en uso.
- El generador y su cable de alimentación no deben entrar en contacto con agua u otros líquidos, ni con superficies húmedas o mojadas.
- Coloque el generador sobre una superficie plana.
- El hidrógeno molecular producido no debe recogerse ni encenderse en la salida de hidrógeno bajo ninguna circunstancia.

3.4. Manejo de los aplicadores

- La salida de hidrógeno del generador debe permanecer siempre completamente despejada; no la bloquee de ninguna manera.
- Asegúrese siempre de que los tubos de los aplicadores de hidrógeno no estén doblados y de que los aplicadores de hidrógeno no estén dañados.
- Utilice únicamente aplicadores de hidrógeno debidamente limpios, sin daños físicos y en buenas condiciones de funcionamiento.
- Cada aplicador de hidrógeno solo debe ser utilizado por una persona específica. Adquiera los aplicadores de hidrógeno exclusivamente en la tienda electrónica **H2Vibe.com** para garantizar el funcionamiento óptimo tanto del generador como de los aplicadores.
- Antes de cualquier uso posterior, desinfecte el aplicador con una solución alcohólica.

3.5. Tiempo de funcionamiento y servicio

- El tiempo máximo de funcionamiento continuo permitido del generador es de 2 horas, siempre que se mantenga una ventilación adecuada en la habitación donde está funcionando el generador. Después de alcanzar el tiempo máximo de producción de hidrógeno molecular, apague el generador durante 30 minutos para permitir que el electrolizador se enfríe.
- Nunca exceda el tiempo máximo de funcionamiento; el incumplimiento de esta norma anulará cualquier reclamación de garantía relacionada con el sobrecalentamiento del generador (el generador tiene un sensor de temperatura interno incorporado).
- Nunca intente desmontar el generador. Todo el mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por nuestro centro de servicio técnico en H2 Medical Technologies s.r.o.

4. Especificaciones del generador

Nombre del producto:	H2 i150 4 en 1 Silver Stone i150
Modelo:	1,3 kg (sin incluir el contenido de agua)
Peso: Potencia:	65 W
Caudal de hidrógeno:	150 ml/min
Intervalos de tiempo:	1/2/3 horas (1 pulsación del botón = 1 hora) 110 (L)
Dimensiones (mm):	× 110 (W) × 190 (H)
Electrolizador: Fluido de funcionamiento:	Tecnología SPE/PEM de DuPont, EE. UU.
Concentración:	Agua purificada (calidad farmacéutica) 99,9 %, hasta 1,56 ppm (durante el proceso de saturación del agua potable)

5. Contenido del paquete

Generador • Bolsa de transporte • Manual de usuario • Aplicador nasal de H2 • Difusor de agua H2


- Herramienta para desenroscar la tapa de la salida para drenar el agua purificada • Fuente de alimentación • Cable de alimentación

6. Descripción del generador


6.1. Sección frontal del generador de hidrógeno

Ventana transparente
para supervisar el nivel del agua

Botón «ON/OFF»

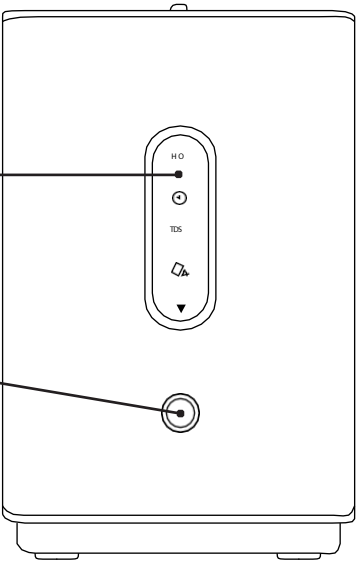


6.2. Sección superior « »

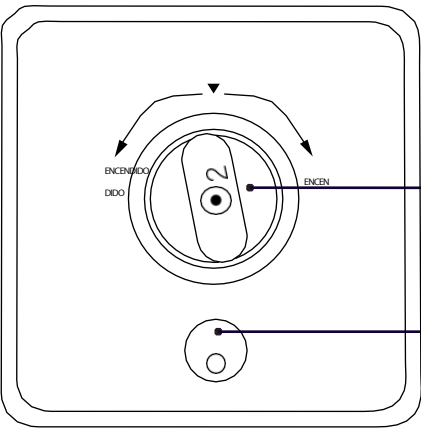


Apertura con tapa para rellenar agua purificada y salida de oxígeno con tapa de rosca

Tapa que cubre la salida de hidrógeno y la salida de hidrógeno

6.2. Sección trasera y lateral

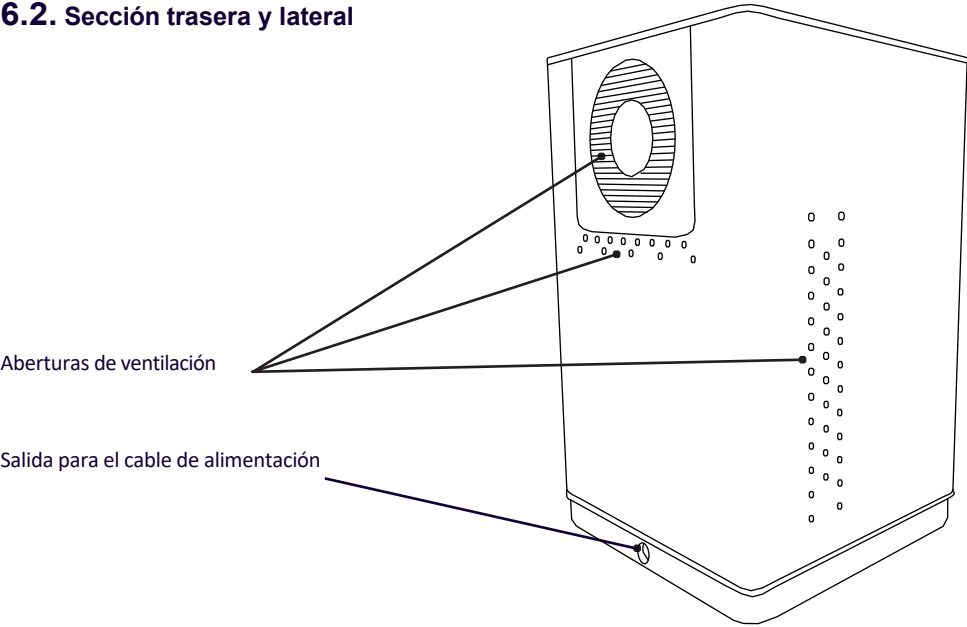

6.3. Sección inferior

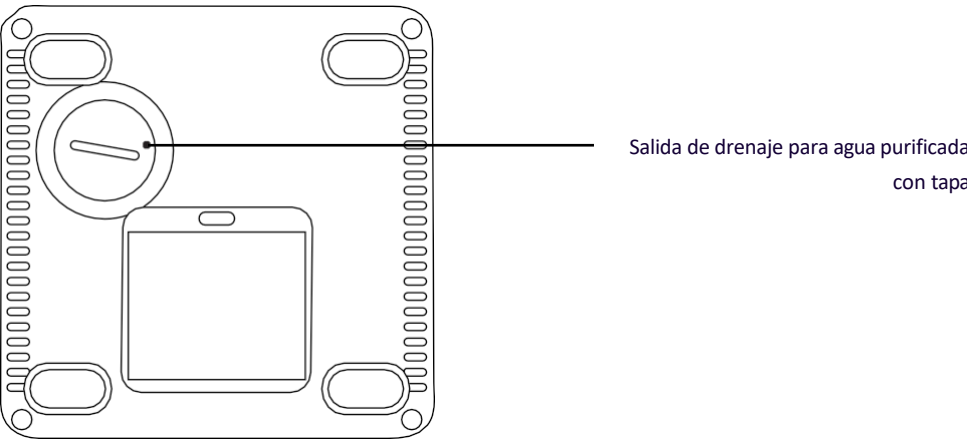


Las imágenes del producto se proporcionan únicamente con fines informativos, y el aspecto, el color o el patrón de la superficie del producto pueden variar en función del modelo específico. El fabricante se reserva el derecho a modificar el aspecto externo de un modelo específico de acuerdo con el plan de desarrollo innovador de ese modelo de producto.

7. Drenaje y llenado de agua purificada


7.1. Rellenado de agua purificada

1. Desenrosque la tapa superior del depósito de agua.
2. Añada agua purificada al generador hasta que el nivel del agua se encuentre aproximadamente 2 mm por debajo del borde superior de la ventana transparente.
3. Vuelva a enroscar la tapa del depósito de agua.

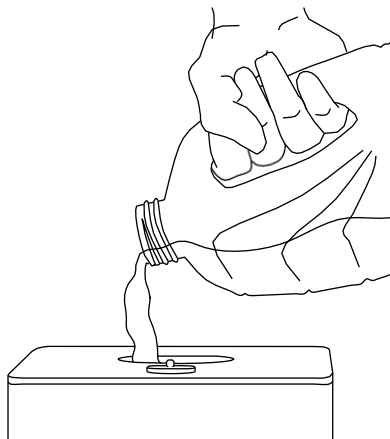

7.2. Drenaje del agua purificada del generador de agua ()


1. Prepare un recipiente vacío para recoger el agua drenada del generador.
2. Sostenga el generador sobre el recipiente.
3. Desatornille la tapa de la salida de drenaje situada en la parte inferior del generador o afloje con la herramienta incluida.
4. Vierta el agua del generador en el recipiente.
5. Vuelva a enroscar la tapa en la salida de drenaje.
6. Coloque el generador sobre una superficie estable.

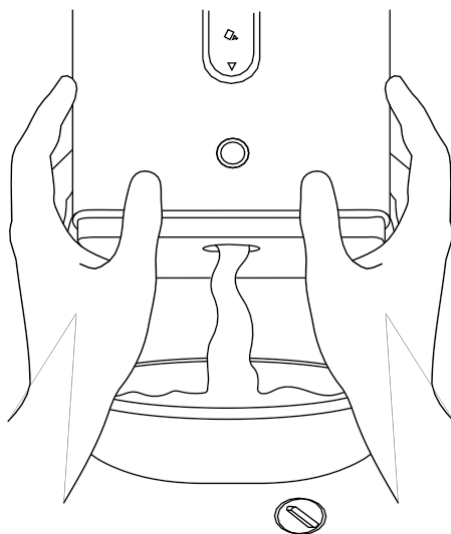


8. Procedimientos de aplicación de

8.1. Producción de agua hidrogenada


1. Enchufe el generador a una toma de corriente. La luz indicadora se iluminará en azul y se apagará al cabo de unos instantes.
2. Retire la tapa de la salida de hidrógeno.

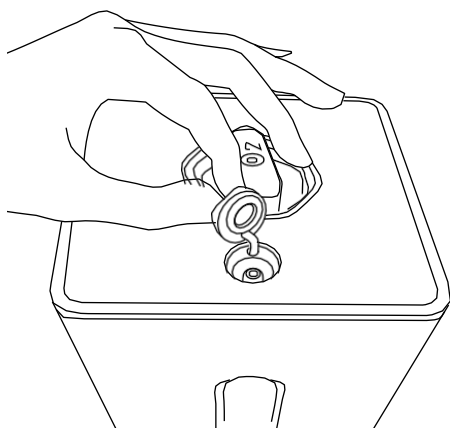

3. Conecte el extremo del tubo difusor de hidrógeno a la salida de hidrógeno situada en la parte superior del generador.

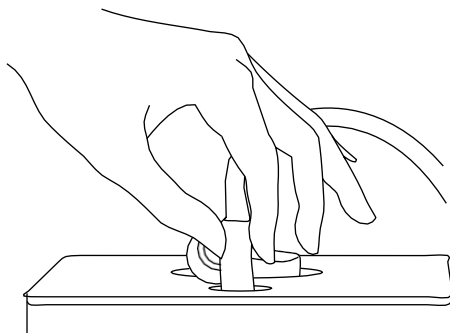


4. Sumerja el difusor en un recipiente con agua.

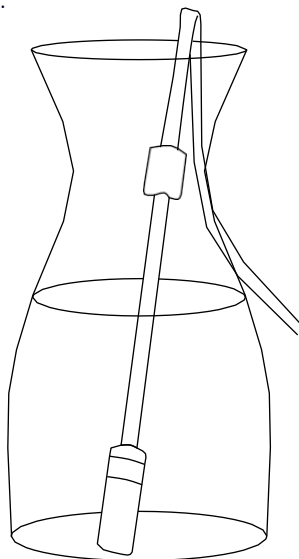


5. Pulse el botón una vez para establecer el tiempo de producción predeterminado para el agua hidrogenada (60 minutos).
6. Tiempo de producción recomendado para la saturación del agua hidrogenada: 15-30 minutos.
7. El generador se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado. Para detener el proceso de producción antes de tiempo, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

8.2 Preparación para la inhalación*

1. Enchufe el generador a una toma de corriente. La luz indicadora se iluminará en azul y se apagará al cabo de unos instantes.
2. Retire la tapa de la salida de hidrógeno.
3. Conecte el extremo del tubo del inhalador de hidrógeno (cánula nasal) a la salida de hidrógeno situada en la parte superior del generador.

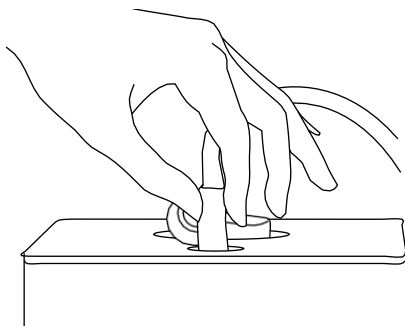

4. Introduzca con cuidado el otro extremo del aplicador en las fosas nasales. Fije ambos tubos sobre las orejas y ajústelos debajo de la barbilla con el clip deslizante para mantener el aplicador firmemente en su sitio.

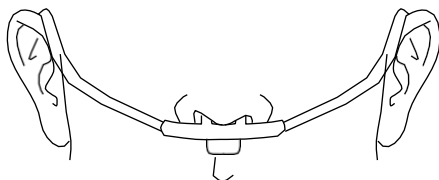


5. Pulse el botón una vez para establecer el tiempo predeterminado para la aplicación nasal (60 minutos).

6. Inhale lentamente el gas hidrógeno por la nariz y exhale por la boca para garantizar un flujo continuo de gas hidrógeno hacia los pulmones.



7. Tiempo de inhalación recomendado: 30-60 minutos. Repita el procedimiento 2-3 veces al día si es posible.

8. El generador se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado. Para detener la producción de hidrógeno antes de tiempo, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

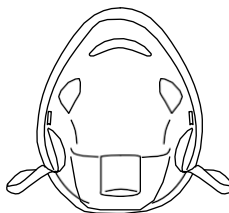


Algunos modelos pueden incluir una **mascarilla de inhalación. Cuando utilice este tipo de mascarilla, inhale hidrógeno molecular por la boca y exhale por la nariz. El procedimiento es el mismo que con el aplicador nasal en todos los demás pasos.*


8.3. Preparación para la aplicación en el oído*

1. Enchufe el generador a una toma de corriente. La luz indicadora se iluminará en azul y se apagará al cabo de unos instantes.

2. Retire la tapa de la salida de hidrógeno.

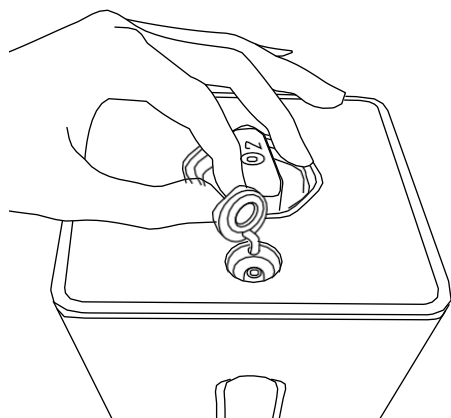

3. Conecte el extremo del tubo aplicador auricular a la salida de hidrógeno situada en la parte superior del generador.

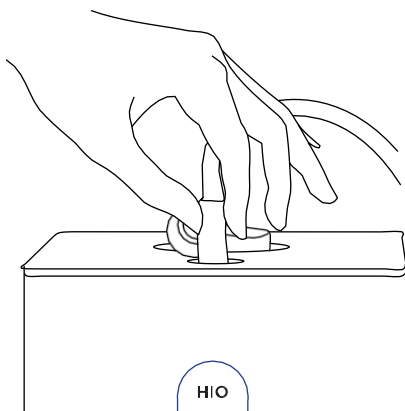

4. Inserte las salidas auriculares en ambos conductos auditivos.



5. Pulse el botón una vez para establecer el tiempo predeterminado para la aplicación en el oído (60 minutos).




6. Tiempo de aplicación recomendado: 15-30 minutos.

7. El generador se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado. Para detener el procedimiento antes de tiempo, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.


* Los aplicadores para los procedimientos mencionados no están incluidos en el paquete. Se pueden adquirir en la tienda online H2Vibe.com.

8.4. Preparación para la aplicación en los ojos*

1. Enchufe el generador a una toma de corriente. La luz indicadora se iluminará en azul y se apagará al cabo de unos instantes.
2. Retire la tapa de la salida de hidrógeno.

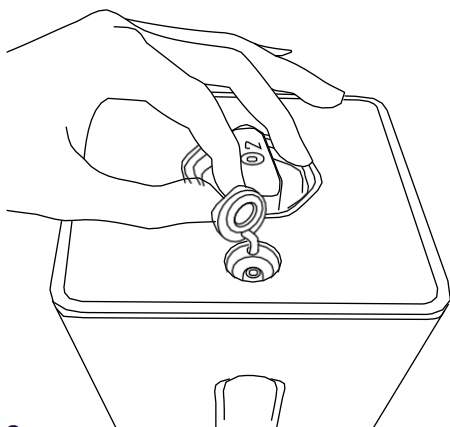

3. Conecte el extremo del tubo del aplicador ocular a la salida de hidrógeno situada en la parte superior del generador.

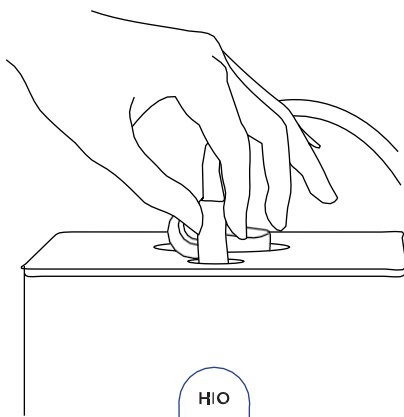

4. Coloque con cuidado el aplicador ocular alrededor de los ojos y fíjelo con la correa alrededor de la cabeza.



5. Pulse el botón una vez para establecer el tiempo predeterminado para la aplicación ocular (60 minutos).
6. Tiempo de aplicación recomendado: 15-30 minutos.
7. El generador se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado. Para detener el procedimiento antes de tiempo, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

* Los aplicadores para los procedimientos mencionados no están incluidos en el paquete. Se pueden adquirir en la tienda online H2Vibe.com.

9. Solución de problemas

El generador no se enciende.	Compruebe que el generador esté correctamente conectado a la toma de corriente y al enchufe eléctrico.
El generador no se enciende. La luz roja parpadea lentamente.	Pulse el botón ON/OFF. El generador no tiene suficiente agua purificada. Rellénelo con la cantidad adecuada de agua purificada.
Luz roja y azul parpadeando alternativamente.	TDS alto (el agua del generador contiene un alto nivel de sólidos disueltos, lo que significa que es un tipo de agua inadecuado). Vacíe el agua y rellene con agua purificada de nuestra tienda online.
Las luces parpadean rápidamente y se acompañan de señales acústicas.	El generador está inclinado. Colóquelo en posición horizontal.
Luz roja encendida.	El generador está en modo de limpieza. Apáguelo y vuelva a encenderlo.
El generador no está produciendo hidrógeno molecular.	El aplicador de hidrógeno está conectado incorrectamente. Compruebe la conexión y asegúrese de que el tubo del aplicador no esté obstruido.
El generador no produce hidrógeno molecular.	El generador no está lleno con una cantidad suficiente de agua purificada. Rellénelo con agua purificada.
Hay una fuga de agua en el generador.	El tiempo de funcionamiento del generador ha superado el límite. Apáguelo, espere a que se enfríe (30 minutos) y vuelva a encenderlo.
Hay una fuga de agua en el generador.	Hay un fallo en el compresor interno. . Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

10. Información sobre la eliminación de residuos

H2 Medical Technologies s.r.o. forma parte del sistema colectivo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de ELEKTROWIN a.s. La eliminación ecológica está garantizada dentro del sistema colectivo ELEKTROWIN (www.elek-trowin.cz). Las ubicaciones para la recogida de productos usados se pueden encontrar en www.elek-trowin.cz. Este producto cumple con los requisitos legislativos de la UE de acuerdo con las Directivas de Nuevo Enfoque en materia de seguridad, protección de la salud y normas medioambientales. Se ha emitido una Declaración de Conformidad CE para este producto.

11. Garantía y condiciones de garantía

Garantía comercial del producto: **24 meses a partir de la fecha de compra.**

La garantía del fabricante cubre el uso adecuado del generador de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario. En tales casos, el fabricante proporcionará reparaciones gratuitas.

Durante el periodo de garantía, se podrán cobrar las reparaciones por defectos causados por:

- El uso de una fuente de agua distinta a la prescrita por el fabricante. Utilice únicamente agua purificada comprada en la tienda online **H2Vibe.com**. El uso de otros tipos de agua puede dañar el generador.
- Error del operador o uso inadecuado del generador.
- Caída del generador desde una altura.
- Desastres naturales o factores externos como incendios, catástrofes naturales, contaminación, sobretensión/subtensión, terremotos, rayos, tormentas de viento, inundaciones y otros eventos similares.
- Daños durante el transporte u otros impactos logísticos.
- Cualquier interferencia por parte del usuario u otra persona con las piezas internas del generador.

12. Condiciones de anulación de la garantía

La garantía comercial quedará invalidada si:

- El producto se instaló incorrectamente o no se siguieron los procedimientos de instalación recomendados y estándar.
- La estructura sufrió daños por choque térmico (por ejemplo, llamas, cigarrillos, agua hirviendo, etc.), antes de la instalación (por ejemplo, impacto, caída, presión, transporte o manipulación inadecuados) o por sustancias químicas o naturales que causan corrosión (por ejemplo, manchas de agua dura o rica en hierro) y factores similares.
- Se realizaron modificaciones o alteraciones en la estructura.
- La estructura se dañó debido a un uso inadecuado o inusual, negligencia en el mantenimiento o procedimientos de mantenimiento incorrectos.

13. Declaración de conformidad de

El fabricante declara que el dispositivo especificado cumple con los requisitos esenciales del Reglamento gubernamental n.º 117/2016 Coll., el Reglamento gubernamental n.º 118/2016 Coll. y el Reglamento gubernamental n.º 481/2012 Coll. El cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento gubernamental n.º 117/2016 Coll. garantiza la conformidad con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. El cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento gubernamental n.º 118/2016 Coll. garantiza la conformidad con la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. El cumplimiento de los requisitos esenciales del Reglamento gubernamental n.º 481/2012 Coll. garantiza la conformidad con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE:

DECLARAMOS BAJO NUESTRA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD QUE EL EQUIPO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

Equipo eléctrico

cumple con las siguientes normas:

Normas: ČSN EN 60335- ed. 3:2012, incluidas las modificaciones
ČSN EN 62233:2008, ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5: 2021,
ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3: 2021, ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5: 2019+A1:2021,
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3: 2014+A1:2019,
Certificado de inspección Número de registro 2022/38 1932/CIE según ČSN EN ISO/IEC 17020.






y las siguientes directrices:

Reglamento del Gobierno de la República Checa n.º 117/2016 Coll., Reglamento del Gobierno de la República Checa n.º 118/2016 Coll., Reglamento del Gobierno de la República Checa n.º 481/2012 Coll.

En Ostrava, el 5 de abril de 2023


Ing. Pavel VÁŠEK
Director técnico comercial Persona responsable


14. Aplicador Compatibilidad

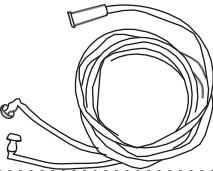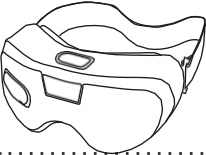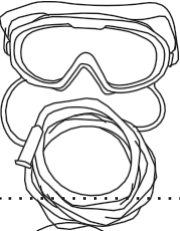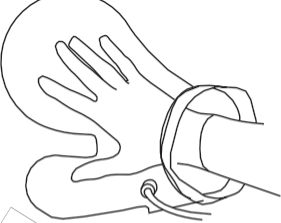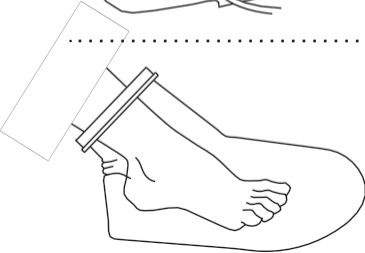VISUALIZACIÓN	NOMBRE DEL APLICADOR	NOMBRE DEL GENERADOR
	Aplicador auricular H2	i150 (oro, plata) i300 i600 i1000 i300 Pro
	Gafas de bienestar H2	i300 i600 i1000 i300 Pro
	Aplicador ocular H2	i150 (Oro, Plata) i300 i600 i1000 i300 Pro
	Funda para aplicaciones H2 - Mano	i300 i600 i1000 i300 Pro
	Funda para aplicaciones H2 - Pie	i300 i600 i1000 i300 Pro

VISUALIZACIÓN


NOMBRE DEL APLICADOR

NOMBRE DEL GENERADOR

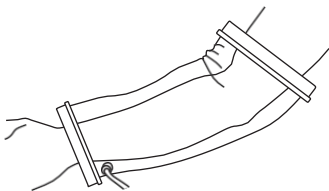


Manguito de aplicación H2
- Codo

i300
i600
i1000
i300 Pro

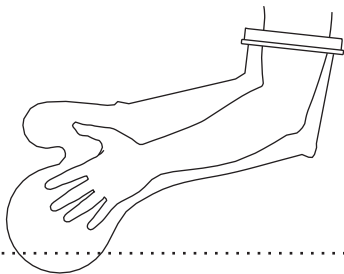

Manguito de aplicación H2
- Brazo

i300
i600
i1000
i300 Pro

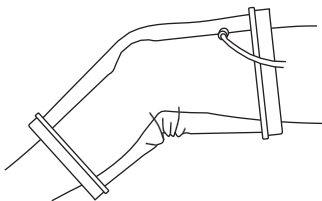

Manguito de aplicación H2
- Rodilla

i300
i600
i1000
i300 Pro



Manga de aplicación H2
- Pierna completa

i1000

15. Tabla de uso de generadores y aplicadores

NOMBRE DEL GENERADOR	APLICACIÓN
i150 (oro, plata)	Inhalación Producción de agua hidrogenada Aplicación en los oídos Aplicación ocular Aplicaciones con manguito Masaje ocular
i300	Inhalación Producción de agua hidrogenada Aplicación en los oídos Aplicación en los ojos Aplicaciones en las mangas Masaje ocular
i600	Inhalación Producción de agua hidrogenada Aplicación en los oídos Aplicación en los ojos Aplicaciones en las mangas Masaje ocular
i1000	Inhalación Producción de agua hidrogenada Aplicación en los oídos Aplicación en los ojos Aplicaciones en las mangas Masaje ocular
i300 Pro	Inhalación Producción de agua hidrogenada Aplicación en los oídos Aplicación en los ojos Aplicaciones en las mangas Masaje ocular

APLICADORES	CAUDAL	TIEMPO DE APLICACIÓN RECOMENDADO
Aplicador nasal Difusor	150	30-60 min.
de agua		15-30 min.
Aplicador para oídos		15-30 min.
Aplicador para ojos		15-30 min.
Fundas para piernas, manos y brazos	×	×
Gafas de bienestar	×	×
Aplicador nasal	60-300	30-60 min.
Difusor de agua	300	15-30 min.
Aplicador auricular	60-240	15-30 min.
Aplicador ocular	60-240	15-30 min.
Fundas para piernas, manos y brazos	300	30 minutos después de llenar el aplicador de H2
Gafas de bienestar	60-240	15-30 min.
Aplicador nasal	120-600	30-60 min.
Difusor de agua	600	15-30 min.
Aplicador auricular	120-240	15-30 min.
Aplicador ocular	120-240	15-30 min.
Fundas para piernas, manos y brazos	600	30 min. después de llenar el aplicador de H2
Gafas de bienestar	120-240	15-30 min.
Aplicador nasal	300	30-60 min.
Difusor de agua	1000	15-30 min.
Aplicador auricular	300	15-30 min.
Aplicador ocular	300	15-30 min.
Fundas para piernas, manos y brazos	1000	30 min. después de llenar el aplicador de H2
Gafas de bienestar	300	15-30 min.
Aplicador nasal	300	30-60 min.
Difusor de agua	300	15-30 min.
Aplicador auricular	300	15-30 min.
Aplicador ocular	300	15-30 min.
Fundas para piernas, manos y brazos	300	30 min. después de llenar el aplicador de H2
Gafas de bienestar	30	15-30 min.

